



**THUASNE**

WINGS  
FOR YOUR HEALTH

TREATMENT  
**OF LYMPHŒDEMA**  
COMPRESSION  
リンパ浮腫ケア総合カタログ



SOLVE CORPORATION JAPAN DISTRIBUTOR THUASNE LYPHHEDEMA



**CATALOGUE 2024**

# THE GROUP THUASNE

## 創立 170 年

チュアンヌは創立170周年を迎えました。これを機に、信頼性、安全性、約束といった企業理念に立ち返し、今後もお客様に頼りにしていただけるよう努めてまいります。

その中で、チュアンヌ グループが開発した、リンパ浮腫治療のための圧迫医療用品をご紹介しますことを大変うれしく思います。弊社の最新の商品がリンパ浮腫に関連する患者様にとって、使いやすく効果的、そして快適にご使用いただける商品であり、お客様が患者様に提供できる治療の選択肢となります。

なかでも、夜間用モビダームautofit（ベルクロ調節式の着衣）は、下肢リンパ浮腫改善のために開発され、この疾患の維持期を最適化できる商品です。

チュアンヌは機敏に対応できる企業であり、大きく変化するヘルスケア業界において、戦略と成長を追求します。

チュアンヌ グループは、変化にさらされているヘルスケア専門家のみなさまをサポートする体制を、今まで以上に整えております。このカタログには、チュアンヌ グループが自信を持ってご紹介する高品質の医療用品が掲載されています。

これらの商品が、みなさまの日々の業務の一助となりますよう心より願っております。


CEO  
Elizabeth Ducottet



Photo credits:  
Studio Caterin  
Martin Colombet  
Pressmaster/Shutterstock  
Thuasne



# CONTENT (目次)

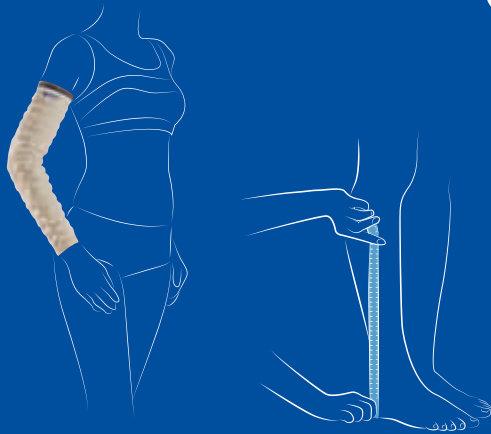

|      |                      |
|------|----------------------|
| P.4  | リンパ浮腫について            |
| P.5  | リンパ浮腫の管理             |
|      | 1：排液期                |
| P.6  | 排液期：プロトコル/製品の基本的な使い方 |
| P.8  | 弾性包帯                 |
| P.9  | モビダーム                |
| P.14 | 2：維持期                |
| P.15 | 夜間モビダーム              |
| P.22 | 着用手順/お手入れ方法          |
| P.23 | オーダーメイド採寸方法/発注書      |

このカタログに掲載されている商品は、クラス I の医療機器で CE マークを取得しております。  
ご使用前に説明書をお読み頂き、医師の指導のもとご使用ください。

#### 【警告】

1. 急性期の深部静脈血栓症患者
2. 動脈血行障害、うっ血性心不全及び装着部に炎症や化膿、疼痛を伴う皮膚疾患、創傷のある患者
3. 装着部位に知覚障害のある患者
4. 糖尿病患者
5. 装着部位に極度の変形を有する患者
6. 線維に対して過敏症のある患者

#### 【禁忌】

1. 重度の動脈血行障害、うっ血性心不全及び重度の深部静脈血栓症、非解剖学的バイパスグラフトの患者
2. 皮膚の創傷（膿瘍、感染性皮膚炎、炎症性の腫れ物）、化膿性静脈炎の患者
3. 同一患者以外への再使用禁止

製品の適応については、各製品紹介をご覧ください

ピフレックスは、動脈の疾患がある場合使用しないでください。（ABPIは0.9～1.3推奨）／モビダームは、皮膚の感染症や腫れがある場合には使用しないでください。／モビダームautofitは、皮膚の感染症や腫れがある場合、進行した糖尿病性細小血管症、ステージⅢ～Ⅳの下肢動脈炎、急性心不全がある場合には使用しないでください。／ビブラスト（BIPLAST）は、皮膚に直接使用しないでください

更新日：2017年12月



病状と治療



役立つ情報



お手入れ方法




既製品



オーダーメイド品

# リンパ浮腫について

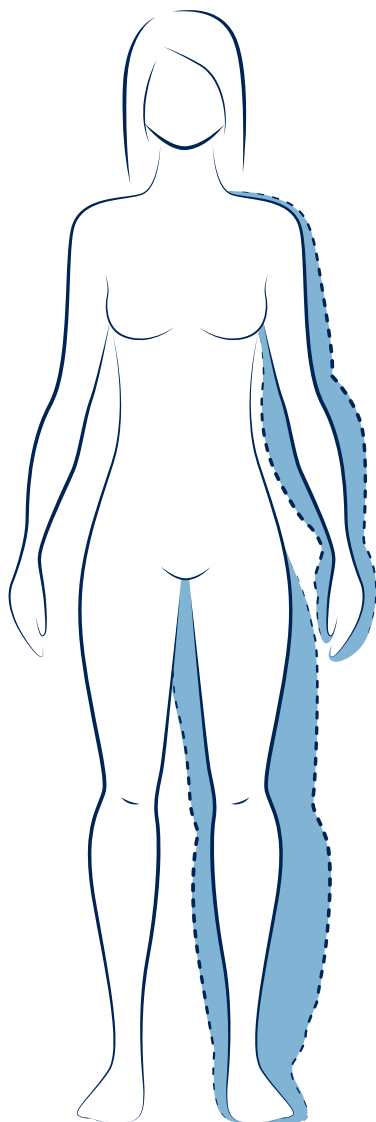

リンパ浮腫は、リンパ管系の機能低下により起こる慢性疾患です。

リンパ浮腫には2つのタイプがあります。

- 原発性リンパ浮腫

先天性の疾患であり、おもに下肢に発症します。

ほとんどの場合、幼児期から治療を始める必要があります。

若年成人期から発症することもあります。

- 続発性リンパ浮腫

乳がん・子宮がん・前立腺がんなどの治療に伴うリンパ節の郭清などによって、リンパ管系が損傷した結果発症します。

## 続発性（二次性）リンパ浮腫

20%

患者の20%に乳がんの治療歴がある (1)

BETWEEN

20%

and

40%

患者の20～40%に婦人科がん、もしくは前立腺がんの治療歴がある (2)

## 原発性（一次性）リンパ浮腫

患者数：推計6000人に1人 (3)

(1) Disipio T et al. Lancet Oncol 2013; 14: 500 Incidence of unilateral arm Lymphoedema after breast cancer: a systematic review and meta-analysis

(2) Beesley V et al. Cancer 2007 Jun 15;109(12):2607-14. Lymphoedema after gynecological cancer treatment : prevalence, correlates, and supportive care needs. Rasmussen E. et al. Radiat Oncol. 2013 Nov 19;8:271 Low rate of lymphoedema after extended pelvic lymphadenectomy followed by pelvic irradiation of node-positive prostate cancer.

(3) Orphanet, webportal on rare diseases and orphan drugs, www.orpha.net : Primary limphoedema - November 2007 - Document prepared in collaboration with: Dr Stephane Vignes /Consultation of the reference center for rare vascular diseases, Cognacq-Jay Hospital, Paris.





# リンパ浮腫の管理

リンパ浮腫を発症している患者は、必要な情報を得ることが大切です。

## 主な治療の目的：

- ・ 排液と安定した維持
- ・ 四肢機能の改善
- ・ 合併症のリスク低減
- ・ 患者への教育と、心理的な社会的サポート

この機能が低下をした疾患は継続的な管理が必要で、それらは2つのフェーズに分けられます。

## 2つの治療期

リンパ浮腫は、継続的な治療が必要となります。リンパ浮腫の状態に合わせて、集中的な治療（排液期）と補助的な治療（維持期）の2段階に分けて行われます。  
この治療の基礎となるものは、マニユアルリンパドレナージ（MLD）と圧迫療法です。

1 排液期

2 維持期



## 排液期 (THE REDUCTION PHASE)

排液期は、集中的に改善させる治療期として認知されています。  
浮腫の軽減を目的とした包帯法に、MLDもしくは空気圧式マッサージ器が併用されます。  
目的は、患肢の腫脹部分をできるだけ健肢に近い状態に戻していくことです。  
包帯の長所は、浮腫の状態や部位の形状に合わせて患部に繰り返し適切に巻けることです。

### ※複合的治療

- ・ スキンケア
- ・ マニユアルリンパドレナージ（MLD）
- ・ 圧迫療法
- ・ 運動療法



# 排液期（THE REDUCTION）

## THE PROTOCOLS/製品の基本的な使い方

排液期では、おもに包帯を使います。  
包帯を使う長所は、浮腫の状態や部位の形状に合わせて、巻いた位置がずれた場合も簡単に巻き直しができることです。  
数種類の包帯を組み合わせることで、すみやかかつ効果的に浮腫を減少させます。

1

### COTTON BANDAGE

最初に、柔らかい「コットンバンデージ」を、直接肌に巻きます。  
この筒状コットンバンデージは、伸縮性が10%以下の伸びない包帯で、患肢を適度な圧で保持します。  
またデリケートなリンパ浮腫の皮膚を保護する役割があります。



2

### MOBIDERM

次に「モビダーム」を、最初に巻いたコットンバンデージの上に重ねます。  
ブロック型スポンジによる分散圧によって、より短期間で、より効果的にリンパ液を排液し、浮腫を減少させるとともに、皮膚の硬化を改善させます。



3

### BIFLEXIDEAL

次にショートストレッチバンデージの「ビフレックスイデアル」を巻きます。  
この包帯で患肢を保持しながら、適度な運動を加える事により排液効果が促されます。  
※重度のリンパ浮腫や活動性のある患者の場合は、ビフレックスイデアルを1, 2本追加して用いる事でより効果的な排液を促します。



4

### BIFLEX

最後に、患肢を適切に圧迫し、浮腫を効果的に減少させる包帯である「ビフレックス」を巻きます。  
これは日中のみ使用する弾性包帯です。  
※活動性が低い患者や、線維化などの患者に用いる事でより効果を有します。夜間帯に用いる際には、包帯を伸張させず使用します。



この基本的なプロトコルは、リンパ浮腫治療の排液期と維持期に必要な下記の4つの役割を最大限に活用しています。

<保護 ・ 排液 ・ 保持 ・ 圧迫>

# バンテージの手順

●従来通り指包帯は事前に巻いてください。

※ビフレックスイディアル（3cm）または、市販の指包帯を用いて巻きます。



1.コットンバンテージを直接患肢にあてて巻き皮膚を保護します

★モビダームを用いることで、マッサージ作用（剪断）が発生します。

皮膚の保護をして、安全にお使いいただくためにもご使用を推奨します。



2.モビダームを巻きます。

★モビダームを巻く際には、1ブロック分を重ねて巻いていきます。

足底部に巻かない場合は、指の付け根から足背部にあててそのままくるぶし方向に巻きます。



3.ビフレックスイディアルを巻きます。

★ビフレックスイディアルの上からモビダームのスポンジを患肢に馴染ませる様に擦りながら巻きます。

モビダームのブロックを患肢に食い込ませることで、より効果的にご使用いただけます。




4.ビフレックスを巻きます。

★患肢の状態にあわせて、指標を用いて圧力を調整します。

夜間使用時には血栓症などに注意を払い、伸張させずにご使用することを推奨いたします。

## MOBIDERM BANDAGES

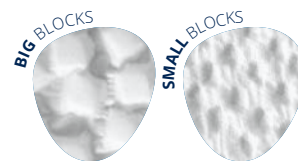

## モビダームパッド

| 幅×長さ        | ブロックサイズ       | 注文コード  | 標準価格(税込価格)     |
|-------------|---------------|--------|----------------|
| 25 cm × 1 m | 5 mm × 5 mm   | MP-O10 | ¥6,820(¥7,502) |
|             | 15 mm × 15 mm | MP-O20 | ¥5,280(¥5,808) |



## モビダームバンテージ

| 幅×長さ        | ブロックサイズ       | 注文コード  | 標準価格(税込価格)     |
|-------------|---------------|--------|----------------|
| 10 cm × 3 m | 5 mm × 5 mm   | MB-O10 | ¥6,820(¥7,502) |
|             | 15 mm × 15 mm | MB-O20 | ¥5,280(¥5,808) |



## ショートストレッチ コットンバンテージ

非弾性包帯  
筒状包帯 綿：100%使用

| 幅     | 長さ  | 色    | 注文コード  | 標準価格(税込価格)     |
|-------|-----|------|--------|----------------|
| 11 cm | 4 m | ホワイト | CB-O10 | ¥1,740(¥1,914) |



## ビフレックス イディアル

ショートストレッチバンテージ  
強度45 cN/cm 伸張率：65%


| 幅     | 長さ  | 色    | 注文コード  | 標準価格(税込価格)     |
|-------|-----|------|--------|----------------|
| 3 cm  | 5 m | ホワイト | BI-O10 | ¥1,320(¥1,452) |
| 6 cm  |     |      | BI-O20 | ¥1,430(¥1,573) |
| 8 cm  |     |      | BI-O30 | ¥1,580(¥1,738) |
| 10 cm |     |      | BI-O40 | ¥1,750(¥1,925) |

# The MOBIDERM device モビダームデバイス



モビダームは、ブロック型スポンジを不織布素材に包み込んだ、バンテージとパッド型の圧迫治療に用いる医療機器です。

モビダームは、解剖学的にどのような形状にもフィットする抜群の適合性を有します。そのため、浮腫減退を目的とした包帯として、または弾性着衣に仕立てることが可能です。多くの圧迫に使用する材料は、圧迫により浮腫を改善させるのに対し、モビダームは毛細リンパ管を刺激することで、毛細リンパ管からの回収を促し、浮腫を改善させます。

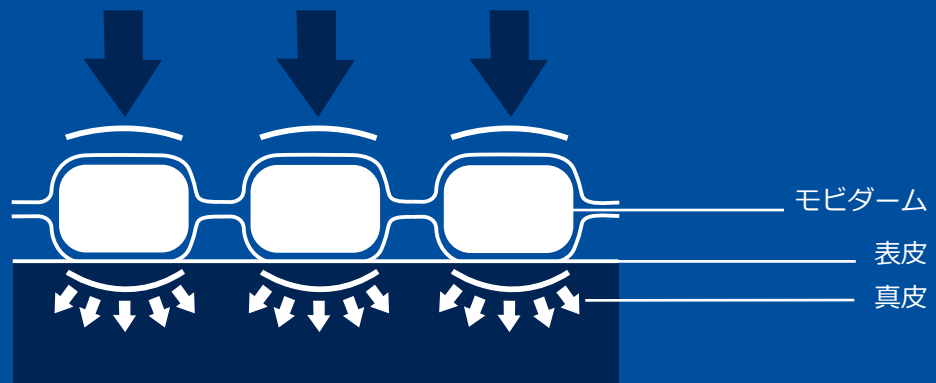

## マイクロマッサージ効果



皮下組織の線維化、皮膚の硬化改善により排水効果を促進

- ・ブロック型のスポンジによる剪断応力と、スポンジが接触する領域とその周辺との間に圧力の差（分散圧）を作ることによって、圧の強い領域から低い領域に向けてリンパ液の移動が起こります
- ・その作用は、筋の収縮によってより効果的に組織に働きかけます
- ・マッサージ効果により、皮下組織の線維化、皮膚の硬化を改善します

皮下組織を改善しながらリンパ液の排水効果を促す、卓越した圧迫用品としてリンパ浮腫の改善に寄与します。




## MULTI-TYPE BANDAGES

## ELASTIC COMPRESSION

## ビフレックス

圧迫圧指標ゲージ付き（ミドルストレッチ）弾性包帯  
2方向弾性包帯  
圧迫圧指標ゲージ（包帯の圧力を表す目盛り）付きで  
目視で圧迫圧の調整が可能

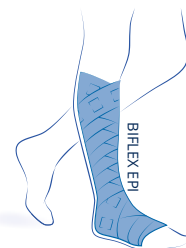


| タイプ              | 幅     | 長さ    | 色    | 注文コード  | 標準価格(税込価格)     |
|------------------|-------|-------|------|--------|----------------|
| ビフレックス16+（ライト）   | 8 cm  | 3 m   | ベージュ | BN-601 | ¥2,280(¥2,508) |
|                  |       | 3.5 m |      | BN-602 | ¥2,580(¥2,838) |
|                  |       | 4 m   |      | BN-603 | ¥2,870(¥3,157) |
|                  |       | 5 m   |      | BN-604 | ¥3,160(¥3,476) |
|                  | 10 cm | 3 m   | ベージュ | BN-605 | ¥2,980(¥3,278) |
|                  |       | 3.5 m |      | BN-606 | ¥3,270(¥3,597) |
|                  |       | 4 m   |      | BN-607 | ¥3,560(¥3,916) |
|                  |       | 5 m   |      | BN-608 | ¥3,820(¥4,202) |
| ビフレックス17+（ストロング） | 8 cm  | 4 m   | ベージュ | BN-702 | ¥3,160(¥3,476) |
|                  | 10 cm | 3 m   | ベージュ | BN-703 | ¥3,060(¥3,366) |
|                  |       | 3.5 m |      | BN-704 | ¥3,450(¥3,795) |
|                  |       | 4 m   |      | BN-705 | ¥3,860(¥4,246) |
|                  |       | 5 m   |      | BN-706 | ¥4,180(¥4,598) |

## BIFLEX APPLICATION IN TWO SIMPLE STEPS

ビフレックスの使い方／設定圧の指標

## ① STRETCHING

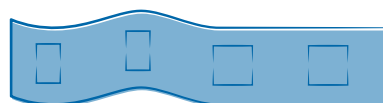


長方形

正方形

30%伸ばす


## ② OVERLAP

## BIFLEX 16+

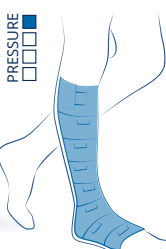


正方形を半分覆う  
21-25mmHg

## BIFLEX 16+

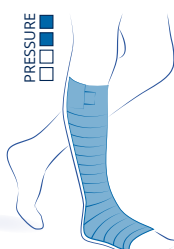


正方形を全部覆う  
31-37mmHg

## BIFLEX 17+

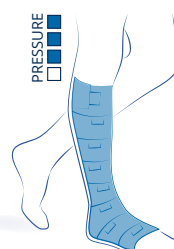

正方形を半分覆う  
44-53mmHg

## BIFLEX 17+

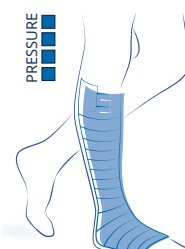

正方形を全部覆う  
> 53mmHg

# MULTI-TYPE BANDAGES

## ELASTIC COMPRESSION

### ビフレックス ループ（セルフケア用）

圧迫圧指標ゲージ付き（ミドルストレッチ）弾性包帯  
足入れループ付  
ループ付のため、巻き始めが容易な弾性包帯



| タイプ                      | 幅     | 長さ  | 色    | 注文コード  | 標準価格(税込価格)     |
|--------------------------|-------|-----|------|--------|----------------|
| ビフレックス16+ ループ<br>(ライト)   | 8 cm  | 3 m | ベージュ | BL 601 | ¥2,480(¥2,728) |
|                          |       | 4 m |      | BL-602 | ¥3,080(¥3,388) |
|                          | 10 cm | 3 m | ベージュ | BL-603 | ¥3,180(¥3,498) |
|                          |       | 4 m |      | BL-604 | ¥3,750(¥4,125) |
| ビフレックス17+ ループ<br>(ストロング) | 10 cm | 3 m | ベージュ | BL-701 | ¥3,260(¥3,586) |
|                          |       | 4 m |      | BL-702 | ¥4,050(¥4,455) |

### ビフレックス ループ（セルフケア用） 巻き方

包帯を巻く時間が短縮でき、患者や家族、自宅や病院の介助者をサポート

1. 足の甲をループに通します
2. 甲の真上にループの縫い目が位置するようにします
3. 最初の1周目はかかとを覆うように巻きます
4. 2周目は足底～甲を巻きます
5. 3周目はかかとから足首に向かって巻きます
6. 上記の設定圧を参考にして巻き上がります

## ACCESSORIES

### FORM BANDAGE (フォームバンテージ) ラテックス スポンジ

包帯の端が斜めにカットされ、包帯を重ねてもかさばりにくい構造。  
通気性があり、皮膚の浸軟リスクを低減します。



| 厚さ    | 幅     | 長さ  | 注文コード  | 標準価格(税込価格)     |
|-------|-------|-----|--------|----------------|
| 8 mm  | 8 cm  | 1 m | FB-O10 | ¥1,380(¥1,518) |
|       | 10 cm |     | FB-O20 | ¥1,660(¥1,826) |
| 12 mm | 10 cm | 1 m | FB-O30 | ¥1,870(¥2,057) |

### VARICO (バリコパッド) ラテックス スポンジパッド

変形部に対し追従性がよく、弾性圧迫治療を最適にします。  
通気性があり、皮膚の浸軟リスクを低減します。

| タイプ | 幅×長さ            | 入数 | 注文コード  | 標準価格(税込価格)     |
|-----|-----------------|----|--------|----------------|
| 0   | 63 mm × 87 mm   | 2入 | VC-000 | ¥2,190(¥2,409) |
| 1   | 70 mm × 132 mm  | 1入 | VC-001 | ¥1,460(¥1,606) |
| 2   | 125 mm × 164 mm | 1入 | VC-002 | ¥1,790(¥1,969) |
| 3   | 200 mm × 250 mm | 1入 | VC-003 | ¥2,600(¥2,860) |



## MULTI-TYPES BANDAGES

### BIPLAST (ビプラスト)




#### ビプラスト

##### 粘着性圧迫包帯

ヘリボーン模様粘着剤を使用。

包帯全体に多方向への粘着性があり、柔軟性と順応性に優れた包帯。

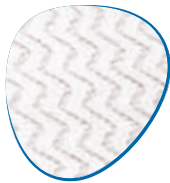

| 幅     | 長さ    | 色    | 注文コード  | 標準価格(税込価格)     |
|-------|-------|------|--------|----------------|
| 3 cm  | 2.5 m | ホワイト | BP-010 | ¥ 680(¥ 748)   |
| 6 cm  |       |      | BP-020 | ¥1,040(¥1,144) |
| 8 cm  |       |      | BP-030 | ¥1,260(¥1,386) |
| 10 cm |       |      | BP-040 | ¥1,520(¥1,672) |
| 15 cm |       |      | BP-050 | ¥2,090(¥2,299) |
| 20 cm |       |      | BP-060 | ¥2,690(¥2,959) |



#### プロテクティブフォーム

##### 薄型伸縮スポンジ（発泡）包帯

粘着性包帯下の皮膚保護用

| 幅    | 長さ   | 注文コード  | 標準価格(税込価格)     |
|------|------|--------|----------------|
| 7 cm | 27 m | PF-010 | ¥1,370(¥1,507) |

## 維持期 THE MAINTENANCE

浮腫が減退して良好な状態になったのち、行う治療です。

維持期では適切な弾性着衣（オーダーメイド品/既製品）を使います。

これらの弾性着衣は、包帯による治療効果を維持させるために必要です。

この段階では、間歇的にリンパドレナージを併用することによって効果が維持されます。

圧迫療法では、包帯を何層にも巻いて効果的に浮腫を減少できます。また適切なサイズの弾性着衣を着用してリンパ循環を改善させ、浮腫を軽減させた状態を維持します。

維持期では、既製もしくはオーダーメイドの弾性着衣を使います。

維持期の圧迫は、排液期で改善させた状態のメンテナンスを目的としています。

また、浮腫自体の容積の変動にかかわらず浮腫の増強を防ぐことができます。

|         | FRANCE<br>AFNOR G30 102B STANDARD | GERMANY<br>RAL-GZ 387:2000 STANDARD |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| CLASS 2 | 15 - 20 mmHg                      | 23 - 32 mmHg                        |
| CLASS 3 | 20 - 36 mmHg                      | 33 - 46 mmHg                        |
| CLASS 4 | > 36 mmHg                         | > 49 mmHg                           |

*It is possible --even essential in some cases-- to superimpose several garments in order to achieve the required interface pressure level and thereby obtain the necessary therapeutic pressure.*



**夜間モビダーム着衣は、夜間にも効果的にうっ滞液を誘導するために作られたものです。**

**これらの着衣は既製品もしくはオーダーメイド品があり、排液期で改善した患肢の状態を維持することができます。**



# FOR NIGHT-TIME TREATMENT

## 夜間モビダーム

### 夜間の治療

排液期で得られた効果を維持するために、患者様は効果的で継続が可能なケアを選択する必要があります。

夜間モビダームを、日中に装着した弾性着衣から引き続き装着します。

継続して浮腫にアプローチすることで、日中の治療効果を更に強化します。

夜間モビダームは、柔らかい伸縮性のある素材を使用することで、夜間装着に適したソフトな圧迫を与えるように設計されているため、夜間の治療にも広く受け入れられています。

内側にはモビダームが仕立てられ、リンパ循環を促進させてうっ滞液を誘導します。

- ・容易に着脱ができ、優しい圧力で就寝を阻害しません
- ・日中の圧迫で得られた効果を維持させるため、夜間にも治療を継続します



# MOBIDERM *autofit*

## 夜間モビダーム *autofit*

夜間モビダーム 標準シリーズ（既製品）が、autofit（ベルクロ式）として進化しました。患者様の患肢形態に合わせることができ、ご自身での調節が可能になりました。

### 商品説明：

上肢のリンパ浮腫：夜間モビダーム autofit ミトン付スリーブ

下肢のリンパ浮腫：夜間モビダーム autofit ハイソックス / スtocking

### 適用：

- リンパ浮腫 全ステージの患者様
- 維持期、または排液期終盤の患者様
- 変形性または、進行性の浮腫を発症している患者様
- ご自身の浮腫に対して、積極的にセルフケアを希望される患者様
- 製品がすぐに必要な患者様

### 材質：


- 着衣外側生地：ポリアミド 59% エラスティン 41%
- 腕、脚に使われるモビダーム（15 mm）：不織布 ポリウレタン
- 手、足に使われるモビダーム（5 mm）：不織布 ポリエチレン



既製品はすぐにお届け可能です！

# — 上 肢 —

## ミトン付スリーブ

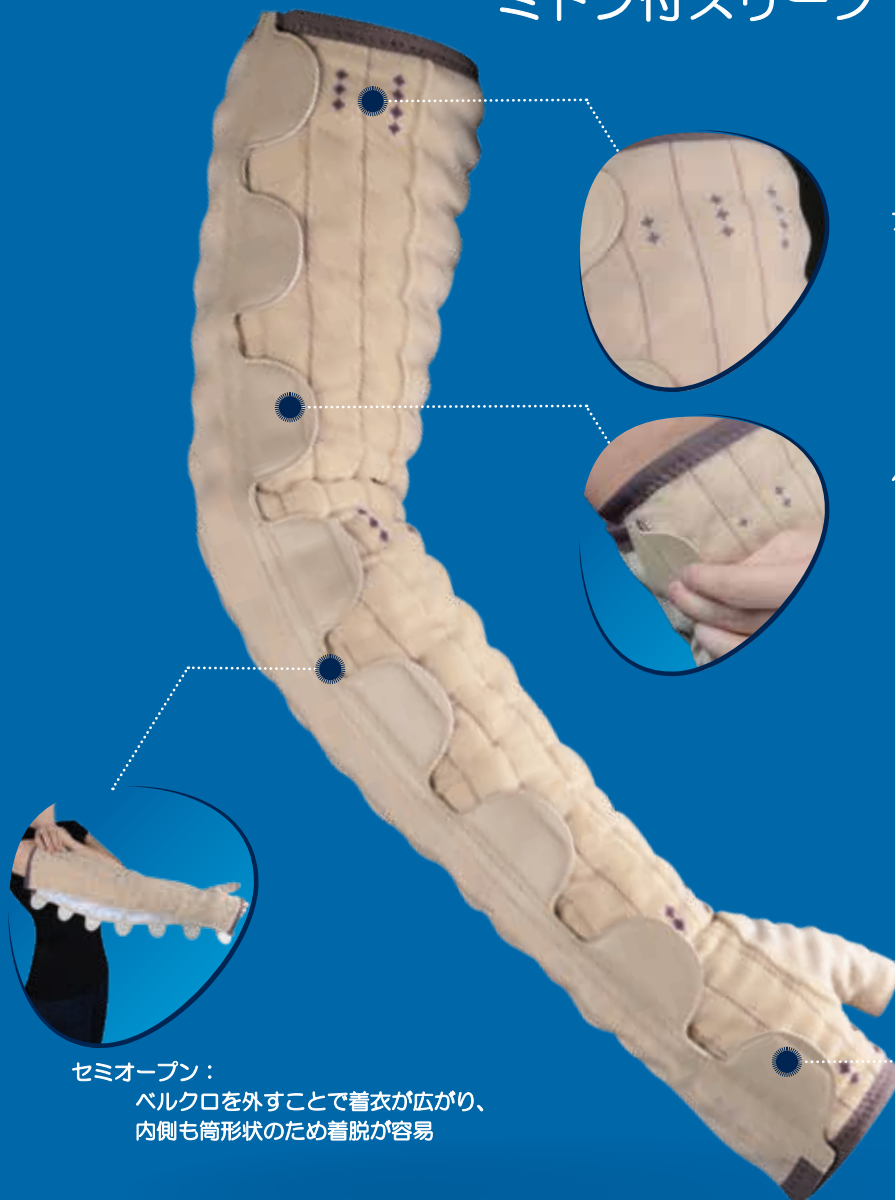

### フィッティングライン：

目視で容易に確認ができ、各部位の適正圧を管理  
浮腫の容積変化に対応して、リバウンドを抑制

### ベルクロ：

ベルクロ採用で、より幅広い患肢に対応

### ミトン付スリーブ：

一体型のため、排液の阻害を低減

### セミオープン：


ベルクロを外すことで着衣が広がり、  
内側も筒形状のため着脱が容易

## 夜間モビダーム AUTOFIT ミトン付スリーブ

圧力 / 18mmHg - 30mmHg

| 規格  | サイズ | 手背部     | 手首部     | 前腕部     | 腋窩部     | 注文コード    |          |
|-----|-----|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
|     |     | B (cm)  | C (cm)  | D (cm)  | E (cm)  | ℓ ノーマル   | ℓ ロング    |
|     |     |         |         |         |         | 40-45 cm | 45-50 cm |
| 右 用 | 1   | 17 - 21 | 15 - 19 | 22 - 28 | 25 - 32 | AMS-110  | AMS-111  |
|     | 2   | 17 - 21 | 16 - 20 | 24 - 30 | 29 - 36 | AMS-120  | AMS-121  |
|     | 3   | 18 - 22 | 17 - 21 | 26 - 32 | 33 - 40 | AMS-130  | AMS-131  |
|     | 4   | 18 - 22 | 17 - 21 | 28 - 34 | 37 - 44 | AMS-140  | AMS-141  |
|     | 5   | 19 - 23 | 18 - 22 | 30 - 36 | 41 - 48 | AMS-150  | AMS-151  |
|     | 6   | 20 - 24 | 19 - 23 | 31 - 37 | 45 - 52 | AMS-160  | AMS-161  |
| 左 用 | 1   | 17 - 21 | 15 - 19 | 22 - 28 | 25 - 32 | AMS-210  | AMS-211  |
|     | 2   | 17 - 21 | 16 - 20 | 24 - 30 | 29 - 36 | AMS-220  | AMS-221  |
|     | 3   | 18 - 22 | 17 - 21 | 26 - 32 | 33 - 40 | AMS-230  | AMS-231  |
|     | 4   | 18 - 22 | 17 - 21 | 28 - 34 | 37 - 44 | AMS-240  | AMS-241  |
|     | 5   | 19 - 23 | 18 - 22 | 30 - 36 | 41 - 48 | AMS-250  | AMS-251  |
|     | 6   | 20 - 24 | 19 - 23 | 31 - 37 | 45 - 52 | AMS-260  | AMS-261  |

標準価格¥17,380 税込価格¥19,118

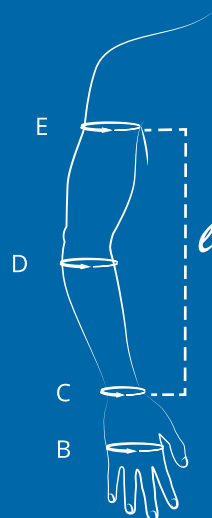

B：手背の周径

C：手首の周径（もっとも細い部分）

D：前腕の周径（肘下5cmまたは前腕最大周径部）

E：腋窩の周径（腋窩または上腕最大周径部）

ℓ：C（手首）～E（腋窩）までの長さ

※現行品の在庫が無くなり次第、順次 新仕様にバージョンアップとなります。

### 【変更点】

1. ベルクロが薄くなりシンプルなデザインに変更

2. (旧)ベルクロが全て連結 → (新)ベルクロが2つつつ連結

これによりベルクロとベルクロの間に隙間があき、関節が動かし易くなります。

# — 下 肢 —

## ハイソックス スtocking



### セミオープン：

ベルクロを外すことで着衣が広がり、  
内側も筒形状のため着脱が容易

### フィッティングライン：

目視で確認ができ、各部位の適正圧を管理  
浮腫の容積変化に対応して、リバウンドを抑制

すべり止め：  
歩行時の転倒防止をサポート

### ダブルベルクロ：

両側にベルクロを採用することで、  
より幅広い患肢に対応  
左右ともに使用が可能

## 夜間モビダーム AUTOFIT ハイソックス

圧力 / 18mmHg - 30mmHg

| 規格   | サイズ | 足背部     | 足首部     | ふくらはぎ部  | 膝下部     | 注文コード      |            |           |            |
|------|-----|---------|---------|---------|---------|------------|------------|-----------|------------|
|      |     | cA (cm) | cB (cm) | cC (cm) | cD (cm) | ℓ (D) ショート | ℓ (D) ノーマル | ℓ (D) ロング | ℓ (D) Xロング |
|      |     |         |         |         |         | 38-40 cm   | 40-42 cm   | 42-44 cm  | 44-46 cm   |
| 左右共用 | 1   | 18 - 23 | 16 - 24 | 24 - 35 | 25 - 36 | AMD-110    | AMD-111    | AMD-112   | AMD-113    |
|      | 2   | 20 - 25 | 20 - 28 | 32 - 43 | 32 - 43 | AMD-120    | AMD-121    | AMD-122   | AMD-123    |
|      | 3   | 22 - 27 | 24 - 32 | 40 - 51 | 39 - 50 | AMD-130    | AMD-131    | AMD-132   | AMD-133    |
|      | 4   | 24 - 29 | 28 - 36 | 48 - 59 | 46 - 57 | AMD-140    | AMD-141    | AMD-142   | AMD-143    |

標準価格¥21,780 税込価格¥23,958

## 夜間モビダーム AUTOFIT スtocking

圧力 / 18mmHg - 30mmHg

| 規格   | サイズ | 足背部     | 足首部     | ふくらはぎ部  | 大腿部     | 注文コード      |            |           |            |
|------|-----|---------|---------|---------|---------|------------|------------|-----------|------------|
|      |     | cA (cm) | cB (cm) | cC (cm) | cG (cm) | ℓ (G) ショート | ℓ (G) ノーマル | ℓ (G) ロング | ℓ (G) Xロング |
|      |     |         |         |         |         | 67-72 cm   | 72-77 cm   | 77-82 cm  | 82-87 cm   |
| 左右共用 | 1   | 18 - 23 | 16 - 24 | 24 - 35 | 46 - 57 | AMG-210    | AMG-211    | AMG-212   | AMG-213    |
|      | 2   | 20 - 25 | 20 - 28 | 32 - 43 | 53 - 65 | AMG-220    | AMG-221    | AMG-222   | AMG-223    |
|      | 3   | 22 - 27 | 24 - 32 | 40 - 51 | 61 - 72 | AMG-230    | AMG-231    | AMG-232   | AMG-233    |
|      | 4   | 24 - 29 | 28 - 36 | 48 - 59 | 68 - 80 | AMG-240    | AMG-241    | AMG-242   | AMG-243    |

標準価格¥27,060 税込価格¥29,766

※現行品の在庫が無くなり次第、順次 新仕様にバージョンアップとなります。

### 【変更点】

1. ベルクロが薄くなりシンプルなデザインに変更
2. (旧)ベルクロが全て連結 → (新)ベルクロが2つずつ連結  
これによりベルクロとベルクロの間に隙間があき、関節が動かし易くなります。



# MOBIDERM autofit

## 【洗濯方法】

### 手洗いの場合

30℃以下の水に、中性洗剤を用いて手で軽く押し洗いをしてください。

### 洗濯機の場合

30℃以下の水に、中性洗剤を用いてソフト洗い（おしゃれ着洗い）をしてください。  
洗濯機を用いる際には、ネットに入れてください。（必ずベルクロを閉じてください）

軽く水気を切り、バスタオルなどで上から押し当てると、さらに水気を早く抜くことが出来ます。脱水機を用いる際は、ネットに入れたまま1分程度なら可能です。  
直接日光があたらないように、室内または室外陰干しで乾燥させてください。  
干す場合にベルクロを外すと、乾きが早くなります。

## 【洗濯時の注意点】

折りたたむ場合は、必ずベルクロ部を下図の様に表側にしてください。


柔軟剤、漂白剤などの使用は不可。

乾燥機、ドライクリーニングの使用は不可。

もみほぐしたり、擦る様な洗いは絶対にしないでください。

モビダームの劣化や耐久性が落ちる原因となり、製品の効果や有効性が維持できなくなります。

モビダームは、光や空気に触れることで黄色く変色いたしますが製品の有効性には影響がございませんのでご安心ください。

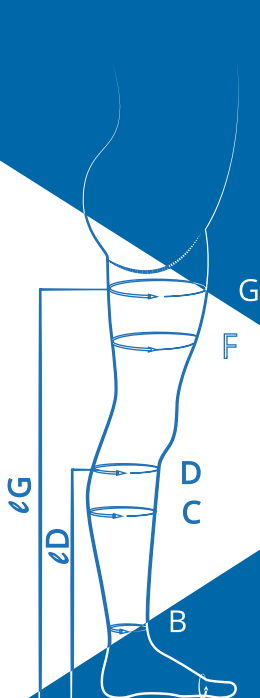

cA : 足背の周径（中足趾節関節の周径）

cB : 足首の周径（もっとも細い部分）

cC : ふくらはぎの周径（もっとも太い部分）

cD : ひざ下の周径（腓骨頭のライン）


cF : 大腿中央の周径

cG : 大腿の周径（もっとも太い部分）

∠D : 床からひざ下までの高さ

∠G : 床から大腿部（臀溝部）までの高さ



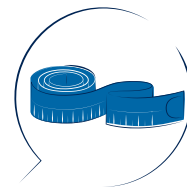

FOR NIGHT-TIME TREATMENT

# 夜間モビダーム着衣

オーダーメイド

## 商品説明：


- ・ 上肢リンパ浮腫/：スリーブ、ミトン付きスリーブ
- ・ 下肢リンパ浮腫/：ハイソックス、ストッキング

## 対象の患者：

- ・ リンパ浮腫 全ステージ
- ・ 維持期、もしくは安定した（排液期終盤）リンパ浮腫
- ・ 変形性の浮腫を発症している患者様や既製品ではサイズが合わない患者様

夜間モビダーム オーダーメイド（MTM） 圧力/10-20mmHg

| タイプ                             | 規格                                                                             | 注文コード  | 標準価格（税込価格）       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 夜間モビダームオーダーメイドスリーブ              | 色/パ・ジ ヌ 15mm <sup>2</sup> 0 <sup>2</sup> 7                                     | YO-010 | ¥21,850(¥24,035) |
| 夜間モビダームオーダーメイドミトン付きスリーブ(親指部分あり) | 色/パ・ジ ヌ 15mm <sup>2</sup> 0 <sup>2</sup> 7+ミト5mm <sup>2</sup> 0 <sup>2</sup> 7 | YO-020 | ¥28,750(¥31,625) |
| 夜間モビダームオーダーメイドミトン付きスリーブ(親指部分なし) | 色/パ・ジ ヌ 15mm <sup>2</sup> 0 <sup>2</sup> 7+ミト5mm <sup>2</sup> 0 <sup>2</sup> 7 | YO-030 | ¥26,450(¥29,095) |
| 夜間モビダームオーダーメイドハイソックス            | 色/パ・ジ ヌ 15mm <sup>2</sup> 0 <sup>2</sup> 7                                     | YO-040 | ¥27,600(¥30,360) |
| 夜間モビダームオーダーメイドハイソックス            | 色/パ・ジ ヌ 5mm <sup>2</sup> 0 <sup>2</sup> 7                                      | YO-060 | ¥27,600(¥30,360) |
| 夜間モビダームオーダーメイドハイソックス            | 色/パ・ジ ヌ 15mm <sup>2</sup> 0 <sup>2</sup> 7+足背5mm <sup>2</sup> 0 <sup>2</sup> 7 | YO-080 | ¥27,600(¥30,360) |
| 夜間モビダームオーダーメイドストッキング            | 色/パ・ジ ヌ 15mm <sup>2</sup> 0 <sup>2</sup> 7                                     | YO-050 | ¥36,800(¥40,480) |
| 夜間モビダームオーダーメイドストッキング            | 色/パ・ジ ヌ 5mm <sup>2</sup> 0 <sup>2</sup> 7                                      | YO-070 | ¥36,800(¥40,480) |
| 夜間モビダームオーダーメイドストッキング            | 色/パ・ジ ヌ 15mm <sup>2</sup> 0 <sup>2</sup> 7+足背5mm <sup>2</sup> 0 <sup>2</sup> 7 | YO-090 | ¥36,800(¥40,480) |
| 夜間モビダームオーダーメイドオプション             | ベルクロ加工 上肢                                                                      | YO-UV  | ¥ 2,400(¥ 2,640) |
| 夜間モビダームオーダーメイドオプション             | ベルクロ加工 下肢                                                                      | YO-LV  | ¥ 2,400(¥ 2,640) |

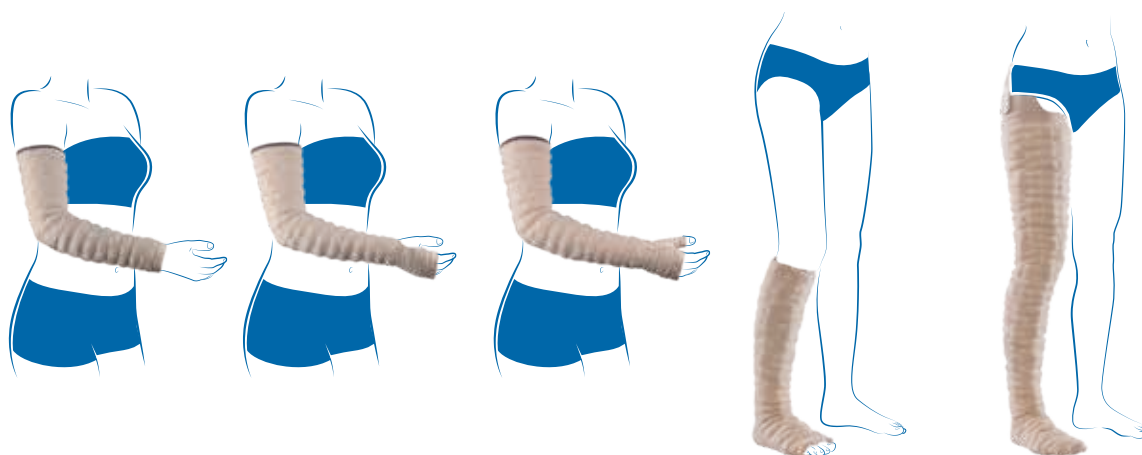

## 材質：

### スリーブ

外側：ポリアミド59% エラスティン41%  
内側：粘着性不織ポリウレタン・スポンジ（15 X 15mmブロック）、  
ポリエチレン・スポンジ（5 X 5mmブロック）

### ストッキング、ハイソックス

外側：ポリアミド80% エラスティン20%  
内側：粘着性不織ポリウレタン・スポンジ（15 X 15mmブロック）

## オーダーメイド商品：

計測値記入用紙は23～27ページにあります。



# 夜間モビダーム着衣

既製品（標準タイプ）

## 商品説明：

・ 上肢リンパ浮腫 / スリーブ、ミトン、グローブ、

## 対象の患者：


- ・ 初期や持続性のリンパ浮腫（変形性の浮腫がない場合）
- ・ 維持期のリンパ浮腫
- ・ すぐにご使用を開始したい患者様



## 既製品はすぐにお届け可能です！


標準スリーブ 圧力/10-20mmHg

| サイズ | 手首部     | 肘部      | 腋窩部     | 注文コード       |            | 標準価格<br>(税込価格)       |
|-----|---------|---------|---------|-------------|------------|----------------------|
|     | C (cm)  | D (cm)  | E (cm)  | ノーマル (45cm) | ロング (50cm) |                      |
| 1   | 14 - 16 | 22 - 25 | 25 - 29 | YS-110      | YS-120     | ¥13,530<br>(¥14,883) |
| 1+  |         | 24 - 27 | 28 - 32 | YS-130      | YS-140     |                      |
| 2   | 16 - 18 | 25 - 28 | 29 - 33 | YS-210      | YS-220     |                      |
| 2+  |         | 27 - 30 | 31 - 35 | YS-230      | YS-240     |                      |
| 3   | 18 - 20 | 28 - 31 | 32 - 36 | YS-310      | YS-320     |                      |
| 3+  |         | 30 - 33 | 35 - 39 | YS-330      | YS-340     |                      |
| 4   | 20 - 22 | 31 - 34 | 35 - 39 | YS-410      | YS-420     |                      |
| 4+  |         | 33 - 36 | 38 - 42 | YS-430      | YS-440     |                      |
| 5   | 22 - 24 | 34 - 37 | 38 - 42 | YS-510      | YS-520     |                      |
| 5+  |         | 36 - 39 | 41 - 45 | YS-530      | YS-540     |                      |

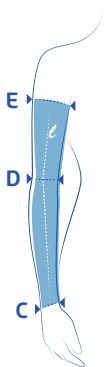


標準グローブ 圧力/10-20mmHg

| サイズ | 手背部     | 手首部     | 注文コード  |        | 標準価格<br>(税込価格)       |
|-----|---------|---------|--------|--------|----------------------|
|     | B (cm)  | C (cm)  | 右用     | 左用     |                      |
| 1   | 15 - 17 | 14 - 16 | YG-110 | YG-210 | ¥10,890<br>(¥11,979) |
| 2   | 17 - 19 | 16 - 18 | YG-120 | YG-220 |                      |
| 3   | 19 - 21 | 17 - 19 | YG-130 | YG-230 |                      |
| 4   | 21 - 23 | 19 - 21 | YG-140 | YG-240 |                      |
| 5   | 23 - 25 | 20 - 22 | YG-150 | YG-250 |                      |
| 6   | 25 - 27 | 21 - 23 | YG-160 | YG-260 |                      |

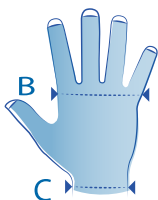

標準ミトン 圧力/10-20mmHg リバーシブル対応

| サイズ | 手背部     | 手首部     | 注文コード  | 標準価格<br>(税込価格)     |
|-----|---------|---------|--------|--------------------|
|     | B (cm)  | C (cm)  | 左右共用   |                    |
| 1   | 15 - 17 | 14 - 16 | YM-010 | ¥6,160<br>(¥6,776) |
| 2   | 17 - 19 | 16 - 18 | YM-020 |                    |
| 3   | 19 - 21 | 17 - 19 | YM-030 |                    |
| 4   | 21 - 23 | 19 - 21 | YM-040 |                    |
| 5   | 23 - 25 | 20 - 22 | YM-050 |                    |
| 6   | 25 - 27 | 21 - 23 | YM-060 |                    |

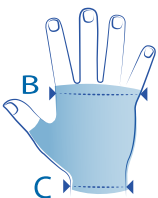


## 材質：

外側：ポリアミド59% エラスティン41%

内側：モビダーム15mm/不織布 ポリウレタン

モビダーム 5mm/不織布 ポリエチレン

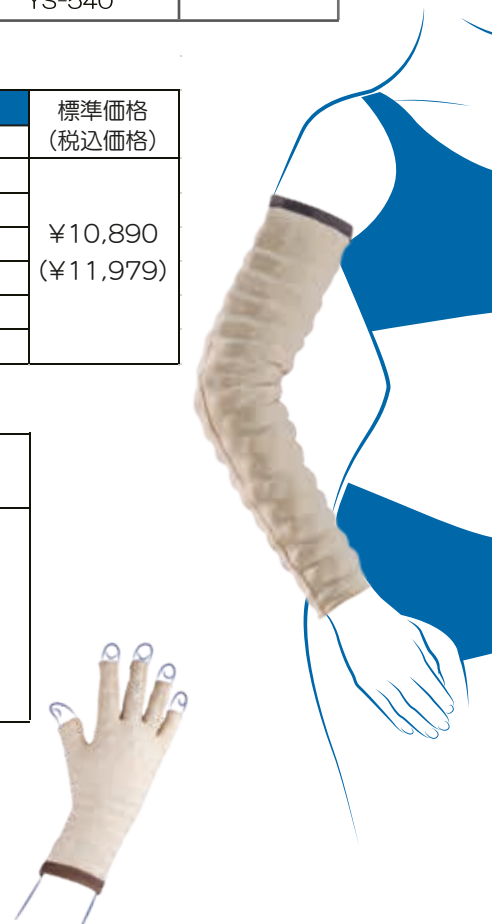


# 着用手順

夜間モビダームは素肌に着用できます。（肌が敏感な方は主治医にご相談ください）




## 夜間モビダーム 標準タイプ/オーダーメイド

- 1 モビダームスリーブを図の様にはめます。
- 2 スリーブに重なるようにグローブ/ミトンをはめます。
- 3 ミトンは左右どちらの手にもご使用いただけます。  
※ スtockingの場合も①と同様に半分に折り返してから穿いていきます。

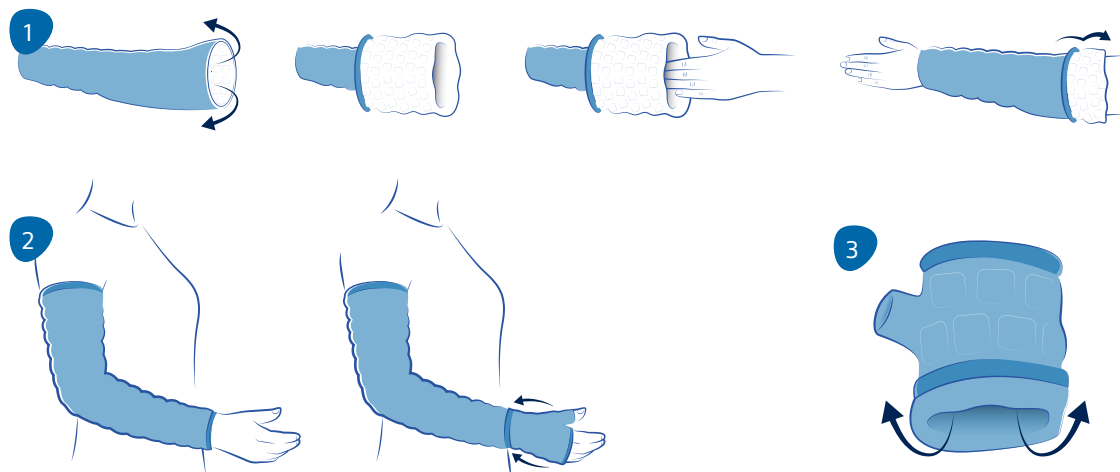

## 夜間モビダームAUTOFIT

- 1 夜間モビダームAUTOFITをはめます。
- 2 医師の指示したフィッティングライン（+/++/+++ /++++）に合わせてベルクロを順々に留めます。推奨された圧迫圧が得られるよう丁寧に行ってください。
- 3 遠位部より全体を揉むように擦ってモビダームを患肢に馴染ませてください。  
※ストッキングやハイソックスも①～③の手順となります。

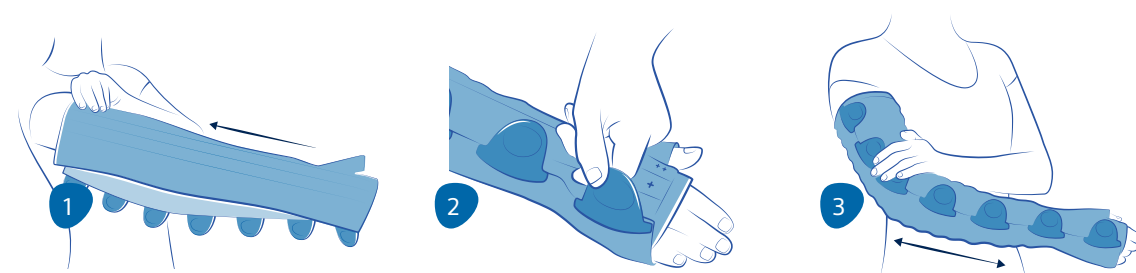

# お手入れの仕方

既製品 / オーダーメイド モビダーム



## 洗い方には2つの方法があります

- ・手洗い：洗剤を入れた冷水に着衣を浸します。  
やさしく洗い、脱水は（タオルなど）押して水分をとってください。
- ・洗濯器洗い：洗濯ネットに入れ、冷水を使用し弱流水で洗うコースを選んで洗濯してください。  
脱水は（タオルなど）押して水分をとってください。  
通常の室温で、直射日光を避け乾燥させてください。



## 夜間モビダームAUTOFIT

使用していないときは、ベルクロを留め平らな場所に保管してください。折り畳む場合は、面テープを外側にして畳んでください。

# MEASUREMENT FORMS

## CONTENT

### オーダーメイド採寸方法/発注書（採寸表）

#### 夜間モビダーム オーダーメイド

##### スリーブ&ミトン付スリーブ

採寸方法----- P.24

発注書（採寸表）----- P.25

##### ストッキング&ハイソックス

採寸方法----- P.26

発注書（採寸表）----- P.27

# MEASURING FOR

## モビダーム・スリーブの採寸

### 採寸場所

e わき下部分の上腕部


d 上腕二頭筋の最大部

c ひじ関節部





b 手首 (a) と肘 (c) の中間部 (前腕最大周径部)

a 手首部 (最も細い部分)

-----▶ 採寸場所の高さと周径を測るための目印

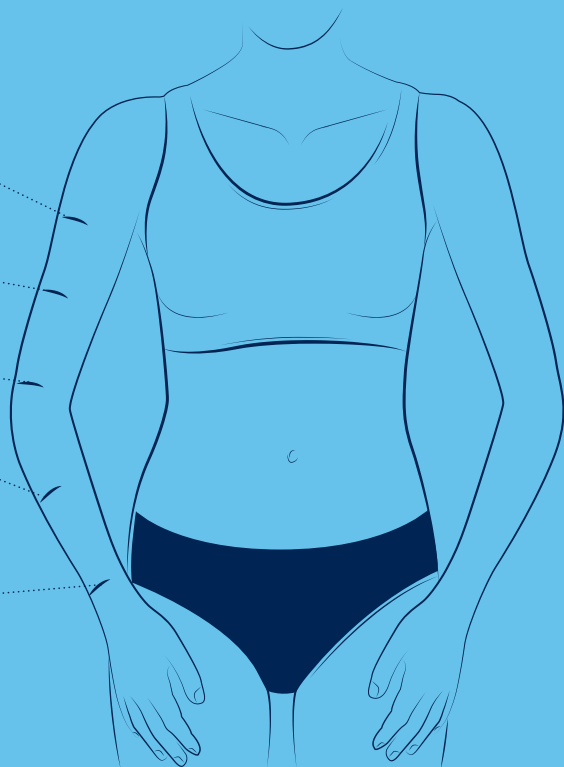

### スリーブ

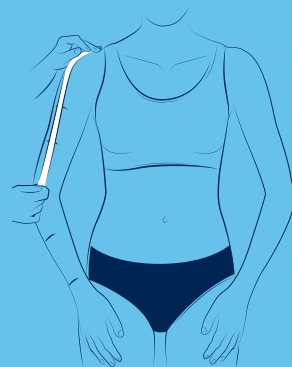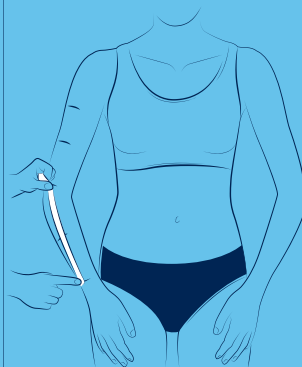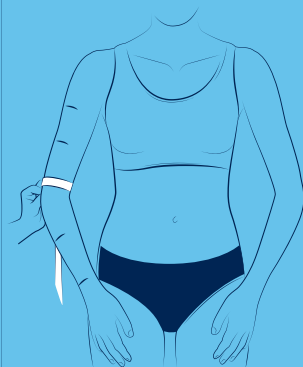
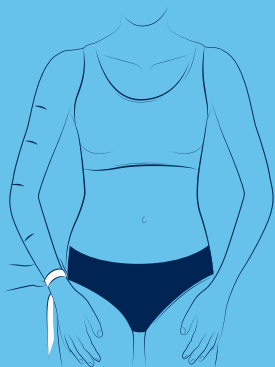


長さの採寸は、手背側手首 (a) の中央部から肘先 (c)、そして肘先 (c) から希望する終点部 (e) までは腕の外側を採寸してください。

### ミトン




親指部分の印のつけ方  
(Marking of the thumb  
web space)

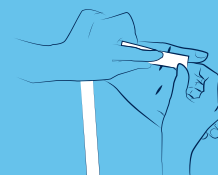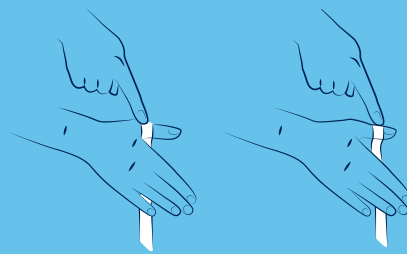

印をつけた位置での採寸：親指付け根部周径 (k) と、親指先端部周径 (j) を採寸してください。  
(製造技術の都合により、親指の長さは2cm未満にはできません)



ミトンの終端部 (i) の周径は、中手骨の先端部で採寸してください。

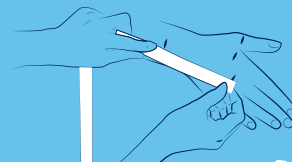

ミトンの長さの採寸方法  
1/ 手首 (a) から親指付け根 (k)  
2/ 手首 (a) からミトン終端部 (i)

日付(Date): .....

ふりがな  
患者名(Patient's name): .....

患者名(ローマ字):.....

患者身長(Patient's height): ..... cm

性別(Gender): ☐ 男(M) ☐ 女(F) ☐ 小児(Child)

住所(Address): 〒.....

電話(Phone):.....

担当者名(Prescriber's name): .....

施設名/取扱店名

JAPAN

採寸方法

<高さ> 上腕・前腕ともに、図内の点線に沿うようにメジャーをあてて測ります。

<周径> 計測ポイントにメジャーを密着させ、実寸値にて測ります。

※患肢の形状が変形している場合には、画像を添付してください

☐ 右腕 (Right) ☐ 左腕 (Left)

## 形状 (Models)

- ☐ スリーブ (Armsleeve)  
☐ ミトン付きスリーブ (親指あり) (Armsleeve with mitten with thumb)  
☐ ミトン付きスリーブ (親指なし) (Armsleeve with mitten without thumb)



## 追加オプション (Sleeve options)

- ☐ ベルクロ加工 (最大の長さは製品丈の1/3まで) (Velcro opening)  
 ※ ベルクロ加工は追加料金が発生します

## コメント (Comments)

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

正面から見た図

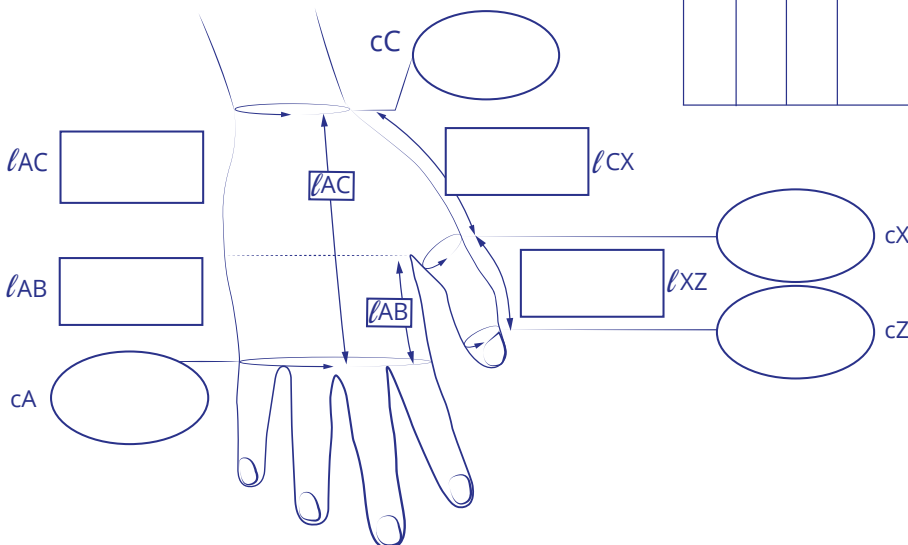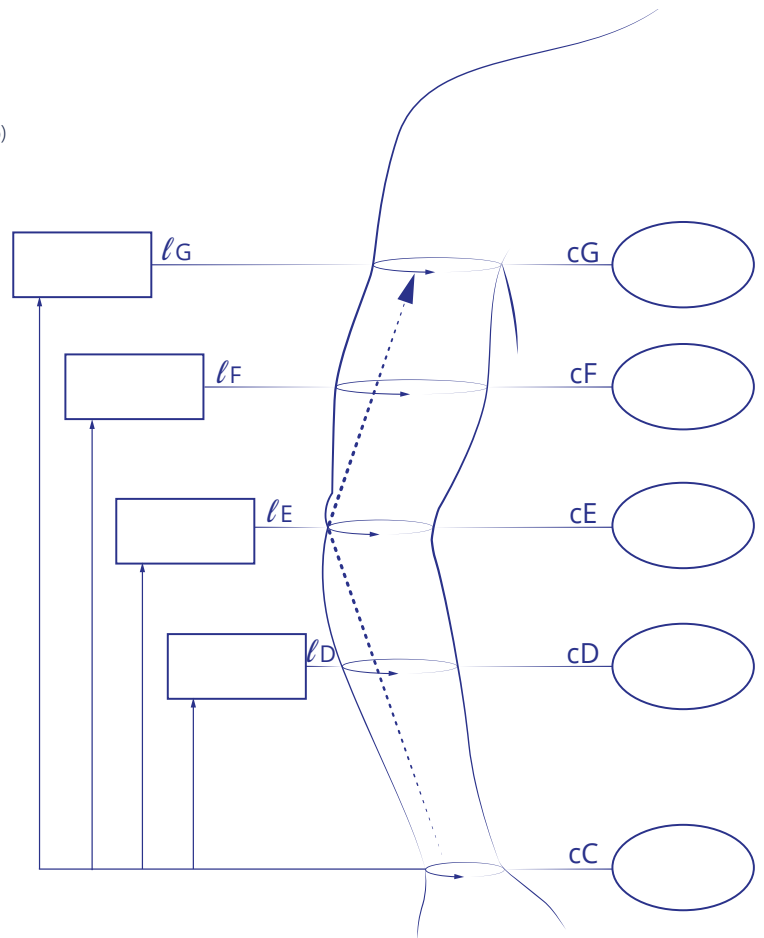

---▶ 高さを測る際にメジャーを沿わせる位置

長さ (cm)

周径 (cm)



# MEASURING FOR

## モビダーム・ストッキング／ソックスの採寸

採寸部の印は、脚の外側に付けてください

### 採寸場所

G 大腿部上端部（殿溝部下）

F 大腿上端部（G）と（E）の中間部（最大周径部）

E 膝蓋骨の中央部

D 腓骨の先端部（膝蓋骨から3～4cm下）


C ふくらはぎ最大部

B1 ふくらはぎ筋肉の最下端部


B 足首部（最も細い部分）

Y 甲から踵骨の周径部


A 中足骨先端部（足背部先端）

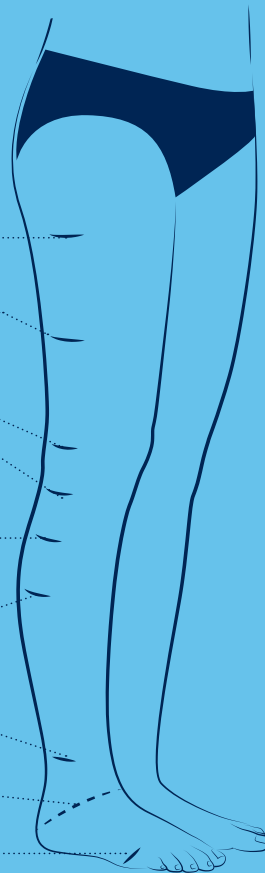

中足骨先端の周径

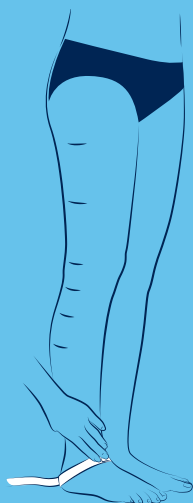


甲から踵部の周径

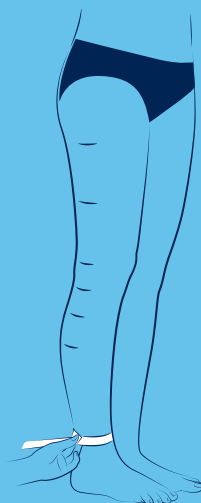

足首の周径（最小部）



太腿の周径  
（殿溝下）

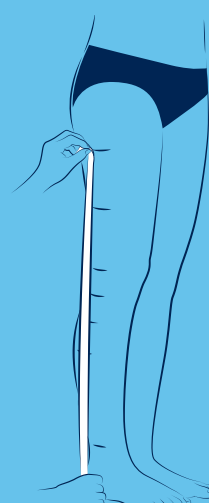

長さの採寸（脚の外側を採寸）

ソックス：cAからcDの周径と床からIDの長さ  
ストッキング：cAからcGの周径と床からIGの長さ

日付(Date): .....

担当者名(Prescriber's name): .....

施設名/取扱店名

JAPAN

採寸方法

計測ポイントにメジャーを密着させ、実寸値にて測定します。

※採寸時は立位で測ります。

※患肢の形状が変形している場合には、画像を添付してください。

ふりがな

患者名(Patient's name): .....

患者名(ローマ字): .....

患者身長(Patient's height): ..... cm

性別(Gender): ☐ 男(M) ☐ 女(F) ☐ 小児(Child)

住所(Address): 〒.....

電話(Phone): .....

## 形状 (Models)

☐ ハイソックス (Sock)

☐ ストッキング (Stocking)

左 (Left)

☐

☐

右 (Right)

☐

☐

## 追加オプション (Options)

☐ ベルクロ加工 (最大の長さは製品丈の1/3まで) (Velcro opening)

※ ベルクロ加工は追加料金が発生します

※ベルクロ加工選択の場合は、スリッベルトは付きません

☐ つま先なし (Open toe)

☐ つま先あり (Closed toe)

## ブロックオプション (Foam option)


☐ 5mm ブロック (All small blocks)

☐ 15mm ブロック (All big blocks)

☐ 15mm ブロック + 足背 5mm ブロック

(Big blocks on the leg and small blocks on the feet)

## コメント (Comments)

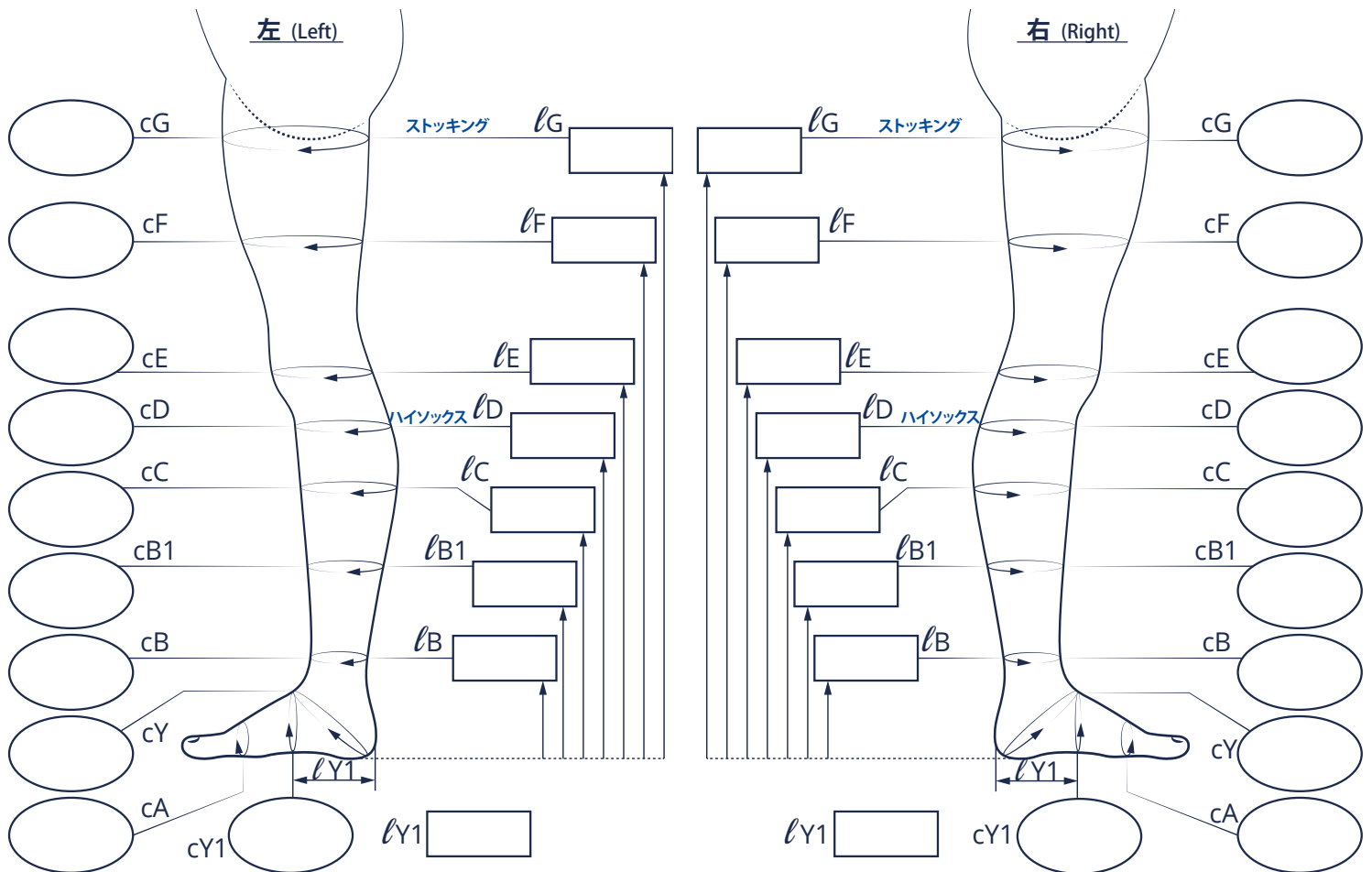

足の長さ:

内側(Inner)

外側(Outer)

長さ (cm)

周径 (cm)

足の長さ:

内側(Inner)

外側(Outer)



# THUASNE



クラス I 一般医療機器  
医療機器届出番号: 14B1X90001TU0003 (包帯)  
医療機器届出番号: 14B1X90001TU0005 (弾性着衣)

発売元 ソルブ株式会社 メーカー事業部  
〒236-0051  
神奈川県横浜市金沢区富岡東2-2-2  
TEL: 045-773-7787 FAX: 045-772-8201  
URL: <http://thuasne.solve-net.com/>  
製造元 THUASNE (チュアンヌ社 / フランス)

取扱店